





### DESCRIPCIÓN Y USOS:

Los porta agujas se utilizan para sujetar y manipular agujas, de forma que permiten suturar a mano alzada heridas o incisiones quirúrgicos y procedimientos estériles para sostener una aguja especializada para realizar suturas en zonas donde es complicado el acceso para el cirujano.

### EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

 Gafas claras de seguridad



 Guantes



 Gorro



 Bata



 Tapa Bocas



### CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA:

- ◀ Salpicadura
- ◀ Heridas
- ◀ Pinchazo

### MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ☑ Antes de realizar el procedimiento retire anillos, pulseras, reloj, entre otros
- ☑ Lave las manos según la técnica requerida para el procedimiento a realizar.
- ☑ Antes de utilizar EL PORTA AGUJAS, Colóquese los guantes, gafas, tapa bocas, gorro y bata
- ☑ Al terminar lave bien sus manos, utilizando los 10 pasos de lavado.
- ☑ Descontamine, desinfecte y esterilice el porta aguja
- ☑ Evitar utilizar porta agujas que estén melladas porque favorecen los actos inseguros.
- ☑ Cuando utilice las tijeras, retire la mano libre de la zona


### OTRO USO QUE SE LE PUEDE DAR AL PORTA AGUJAS MELLADO

- ☑ Al terminar su vida útil como porta agujas, podrá suministrarlas como dotación para:
- ☑ Áreas asistenciales para desprender agujas de las jeringas que estén demasiado apretadas y no suelten en el contenedor bioseguro (guardián).

- ☑ El área de lavandería para que recojan los objetos corto punzantes que llegan enredados en la ropa.
- ☑ Al personal de servicios generales para recoger los elementos corto punzantes que encuentren en los diferentes servicios en el piso o mal dispuestos.

## Nota

---

 Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.